

## MONTAJE DEL KIT JOELETTE TWIN NUEVA GENERACIÓN

PONGA LA  
JOELETTE EN MODO  
DE TRANSFERENCIA



QUITE TODOS LOS CLIPS QUE  
INMOVILIZAN EL TUBO DE FRENO  
(EXCEPTO EL BRAZO OSCILANTE)



QUITE LA PALANCA  
DE FRENO



DESACOPLE EL  
AMORTIGUADOR EN  
LA PARTE INFERIOR



QUITE EL FIJADOR Y EL  
BRAZO OSCILANTE



LA JOELETTE ESTÁ LISTA  
PARA RECIBIR EL KIT





ACOPLE EL KIT AL MARCO DE TRANSFERENCIA CON EL FIJADOR



CONECTE EL AMORTIGUADOR AL KIT UTILIZANDO EL TORNILLO Y LA TUERCA PROPORCIONADOS



MONTE LA PALANCA DE FRENO PROPORCIONADA Y VUELVA A COLOCAR LOS CLIPS PARA INMOVILIZAR EL TUBO

### Información específica :

- Para obtener información acerca del mantenimiento y de las precauciones de empleo, consulte el prospecto adjunto al paquete de su Joëlette a una rueda.
- Para el traslado de los pasajeros, proceda de la misma manera que con la Joëlette clásica.
- Puede, si es necesario, quitar la rueda jockey o escamotearla haciendo girar el soporte a 180°.
- Siempre asegúrese de que cada clavija de seguridad haya sido instalada correctamente antes de hacer senderismo.
- Durante la primera utilización, tome el tiempo de evaluar las posibilidades de franqueamiento de su **Joëlette Twin**.



SU  ESTÁ LISTA