



1. Joëlette sortie du carton



2. Oter la ceinture de sécurité




3. Débloquer les béquilles arrière



4. Monter les béquilles arrière dans les angles



5. Prendre la roue et son bras oscillant

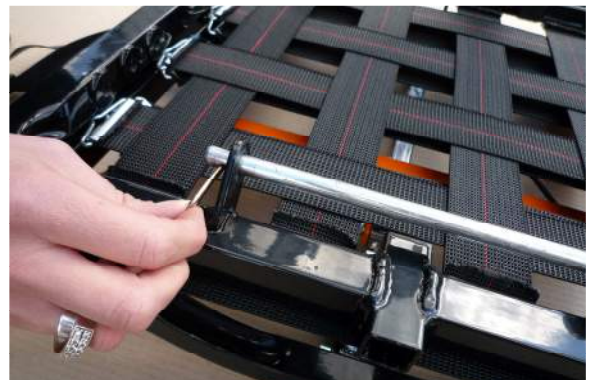

6. Enlever la goupille de sécurité de l'axe



7. Tirer l'axe de son logement



8. Remettre l'axe dans son logement et bloquer la roue


1



9. Verrouiller l'axe et remettre la goupille



10. Dégager l'appui-tête

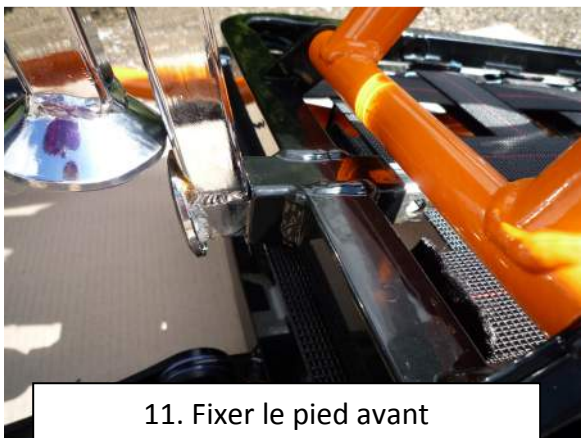


11. Fixer le pied avant et serrer la molette de blocage



12. Verrouiller le pied avec la goupille de sécurité



13. Déplier le pied avant à la verticale

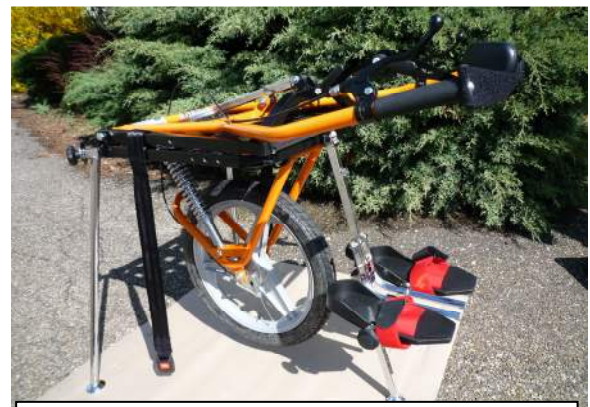

14. Poser la Joëlette sur ses béquilles



15. Vérifier le bon verrouillage du pied



16. Engager le vis d'accouder sur le dossier avec la clé fournie



17. De même pour l'assise et serrer les 2 vis.
Répéter l'opération sur le second bras



18. Installer l'assise et appuyer sur les pressions



19. Installer le dossier



20. Déplier les bras et emboîter les 2 parties



21. Verrouiller les bras avec la goupille de sécurité



22. Accrocher le harnais de traction aux bras avant

Pour le repliage, procéder en sens inverse.

3