


MONTAGGIO **DEL KIT e-JOELETTE** **NUOVA GENERAZIONE**

CONTENUTO **DEL KIT**

www.joeletteandco.com

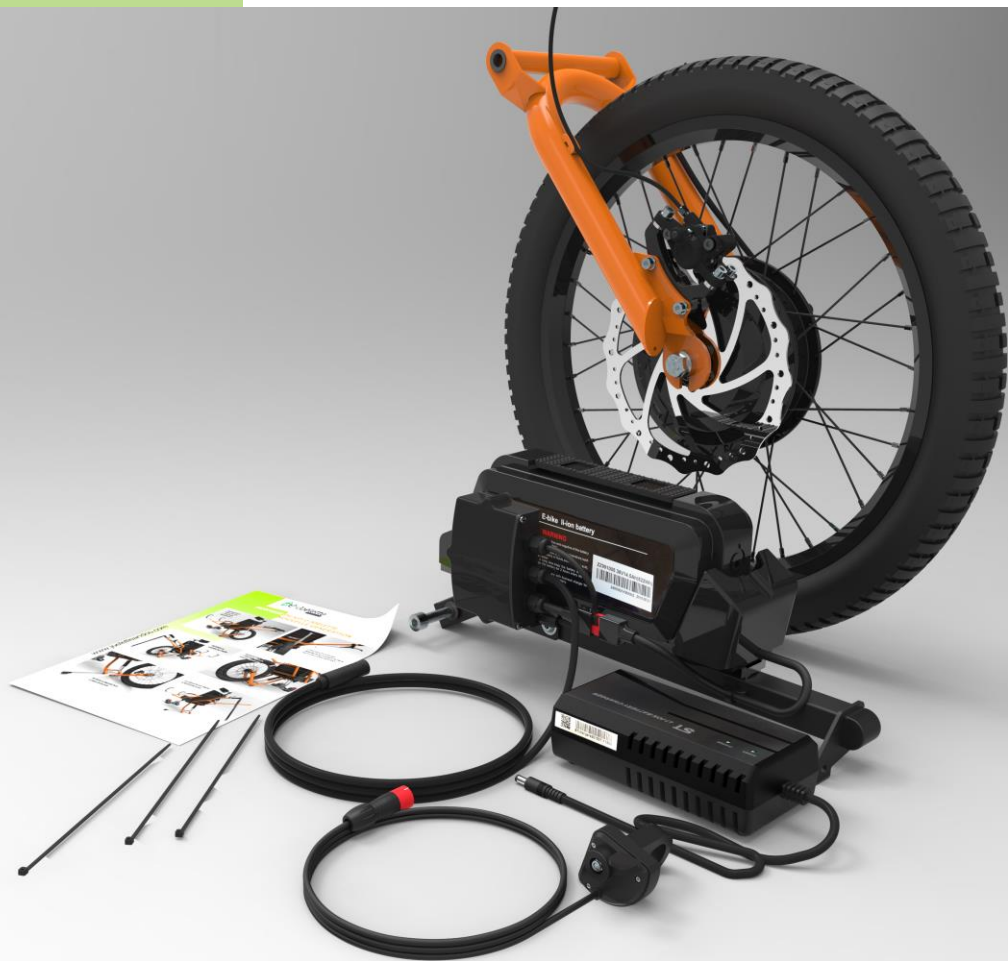

TAPPE DEL MONTAGGIO

METTERE LA
JOLETTE IN
MODALITÀ
TRASFERIMENTO



RIMUOVERE OGNI CLIP CHE
IMMOBILIZZA IL TUBO DEL FRENO
(SALVO IL BRACCIO OSCILLANTE)



RIMUOVERE LA
LEVA DEL FRENO



DISACCOPIARE
L'AMMORTIZZATORE
NELLA PARTE
INFERIORE




LA JOLETTE È PRONTA
A RICEVERE IL KIT



TOGLIERE IL PERNO E IL
BRACCIO OSCILLANTE



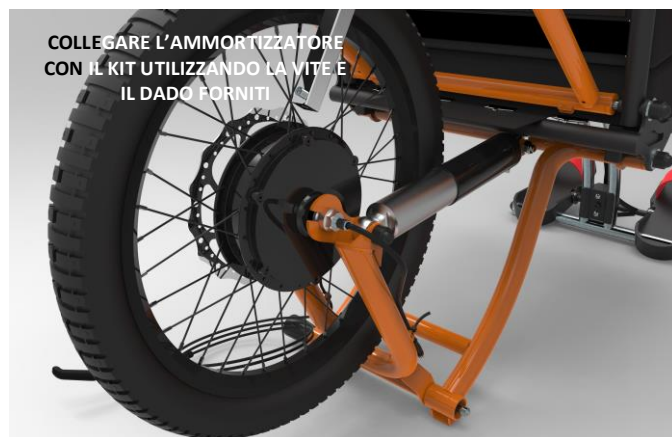



Informazioni specifiche :

- Per la manutenzione e le istruzioni per l'uso, leggere il manuale generale allegato al pacco della vostra **Joëlette a una ruota**.
- Per la trasferta di persone, procedere allo stesso modo che con la Joelette classica.
- Prima di fare un'escursione, assicurarsi sempre che le copiglie di sicurezza sono installate correttamente.

