

MONTAGGIO DEL KIT JOELETTE TWIN NUOVA GENERAZIONE

METTERE LA
JOELETTE IN
« MODALITÀ
TRASFERIMENTO»



RIMUOVERE OGNI CLIP CHE
IMMOBILIZZA IL TUBO DEL FRENO
(SALVO IL BRACCIO OSCILLANTE)



RIMUOVERE LA
LEVA DEL FRENO



DISACCOPIARE
L'AMMORTIZZATORE
NELLE PARTE INFERIORE



TOGLIERE IL PERNO E IL
BRACCIO OSCILLANTE



LA JOELETTE È PRONTA
A RICEVERE IL KIT





ASSEMBLARE IL KIT CON IL
TELAIO CON IL PERNO



COLLEGARE L'AMMORTIZZATORE
CON IL KIT UTILIZZANDO LA VITE
E IL DADO FORNITI



MONTARE LA LEVA DEL FRENO
FORNITA E RIMETTERE I CLIPS PER
IMMOBILIZZARE IL CAVO

Informazioni specifiche:

- Per la manutenzione e le istruzioni per l'uso, leggere il manuale generale allegato al pacco della vostra **Joëlette**.
- Per la trasferta di persone, procedere allo stesso modo che con la Joelette classica.
- Se bisogno, rimuovere il ruotino posteriore facendo girare il supporto a 180°.
- Prima di fare un'escursione, assicurarsi sempre che le copiglie di sicurezza sono installate correttamente.
- Durante il primo uso, prendere il tempo di misurare la capacità di superamento della vostra **Joëlette Twin**.



LA VOSTRA  È PRONTA