

MONTAGE DES JOELETTE-TWIN-SETS «Neue Generation»

DIE JOËLETTE AUFSTÜTZEN
« TRANSFERT POSITION »



KABLE UND BREMSE VON
DEN BESFÄSTIGUNG LÖSEN
(NICHT AM SCHWINGHEBEL)



FESTSTREMBREMSE
LÖSEN



STOSSDÄMPFER VOM RAD
ENTFERNEN



BOLZEN ENTFERNEN VOM
SCHWINGHEBEL



DAS JOËLETTE TWIN KANN NUN
AN DIE JOËLETTE MONTIERT
WERDEN





DER TWINSET AN DEN RAHMEN
MIT DER ACHSE BEFESTIGEN



DEB STÖßDÄMPFER MITHILFE DER
MITGELIEFERTEN SCHRAUBEN
AN DAS TWINSET MONTIEREN



DIE BREMSE MONTIEREN UND
DEN BREMSSCHLAUCH AN DEN RAHMEN
BEFESTIGEN MIT DEN KLAMMERN

Besondere Hinweise :

- Die Sicherheitshinweise und Wartungshinweisungen finden Sie in dem beigefügten Handbuch von der **Joëlette Einrädig**.
- Gehen Sie beim Auf- und Absteigen von personen genauso vor wie mit der **klassischen Joëlette**.
- Bei Bedarf kann das Stützrad durch eine 180° -Drehung der Halterung eingefahren werden.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass alle Sicherungstifte korrekt angebracht sind.
- Nehmen Sie sich vor der ersten Benutzung die Zeit, die Kapazität der **Joëlette Twin** zur bewältigung von Hindernissen abzuschätzen.



IHRE  IST NUN
EINSATZBEREIT