

MANUAL DE USO



Este manual debe ser dado al usuario del producto. Leer este manual ANTES de usar este producto y conservarlo para futuras referencias.

La información contenida en este documento no está contractual y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las imágenes de este manual no son contractuales.

Joëlette *and* Co

by Ferriol-Matrat

www.joeletteandco.com

INTRODUCCIÓN	P. 4
FUNCIONALIDAD	P. 4
GARANTÍA	P. 4
JOËLETTE KID	P. 5
CONDUCIENDO A LA JOËLETTE KID	P. 5
TÉCNICA DE CONDUCIENDO GENERAL	P. 6
La tripulación	p. 6
El piloto	p. 6
El pasajero	p.7
TÉCNICA DE MANEJO ESPECÍFICO	P. 9
Al descenso	p. 9
En los pasos técnicos	p. 9
En las curvas	p. 9
En el peralte	p. 10
INSTALACIÓN DEL PASAJERO EN LA JOËLETTE KID	P. 10
El traslado	p. 10
JOËLETTE KID CON UNA INTERFAZ PARA UN CORSÉ ORTOPÉDICO	p. 10
Vista en despiece de la interfaz para el coré ortopédico.	p. 11
Instalación de la interfaz	p. 12
Dimensiones límite para la adaptación de la base del corsé.....	p. 13
Normas de seguridad	p. 14
NORMAS DE SEGURIDAD AL USAR LA JOËLETTE KID	P. 15
Localización del itinerario	p. 15
El confort	p. 15
La tripulación	p. 15
Preparar bien su excursión	p. 15
Seguro	p. 16
Fondo del bolso	p. 16
Durante la excursión en Joëlette Kid	p. 16
Vista en despiece del chasis de la joëlette kid	p. 17
Vista en despiece del asiento de la joëlette kid	p. 17

OPCIONES	P. 19
MANTENIMIENTO	P. 21
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	P. 21
LIMPIEZA	P. 21
DESINFECCIÓN	P. 22
INSPECCIONES	P. 22
ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN	P. 23
DESPUÉS DEL USO	P. 23
ELIMINACIÓN	P. 23
DATOS TÉCNICOS	P. 24
DESPLIEGUE DE LA JOËLETTE KID	P. 27
INSTALACIÓN DEL REPOSACABEZAS EN EL ASIENTO (EN OPCIÓN)	P. 30
INSTALACIÓN DE LOS BRAZOS	P.31
AJUSTE DEL AMORTIGUADOR	P.32
ALMACENAMIENTO DE LA JOËLETTE KID EN SUS BOLSAS (OPCIONAL)	P. 33
CONTACTO	P. 34

INTRODUCCIÓN

Este manual del usuario contiene información importante sobre el manejo de Joëlette Kid. Para garantizar la seguridad cuando utilice el producto, lea detenidamente el manual de usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Si la versión impresa del manual del usuario tiene un tamaño de letra que le resulta difícil de leer, podrá descargarlo en formato pdf del sitio web www.joeletteandco.com (en la sección “Guía de uso”). Podrá ampliar el pdf en pantalla a un tamaño de letra que le resulte más cómodo.

USO EXCLUSIVO PARA ACTIVIDADES DE OCIO

FUNCIONALIDAD

Utilice la Joelette Kid solo si está en perfecto estado de funcionamiento. Si no es el caso, todo el team puede estar en peligro. La lista que figura a continuación no pretende ser exhaustiva. Simplemente se trata de indicar ciertas situaciones que pueden afectar a la funcionalidad de la Joelette Kid.

Hay que dejar de usar la Joëlette si su funcionalidad se ve afectada por las siguientes razones:

- fallo del sistema de frenos
- fallo del sistema de bloqueo del asiento (perno de anclaje)
- fallo del sistema de bloqueo del chasis
- presión insuficiente de los neumáticos
- manillar o brazos delanteros (opcional) dañado
- reposapiés dañados
- retenedor dañado
- cables dañados, doblados, apretados o sueltos
- pasadores de seguridad faltantes
- aparición de ruidos anormales o inusuales
- soporte dañado

GARANTÍA

La garantía es de 2 años. La garantía es de 2 años. La Joelette debe ser utilizada según lo previsto y mantenida regularmente y con cuidado. Existe un riesgo de accidente y pérdida de la garantía en caso de un mantenimiento defectuoso (página 20).

Por razones de seguridad y con el fin de evitar accidentes causados por el desgaste que no se ha notado, es esencial que la Joelette Kid sea inspeccionada varias veces al año, una vez al mínimo. En condiciones de uso regular, puede ser conveniente efectuar controles intermedios de los frenos y accesorios.

JOËLETTE KID

La Joëlette Kid es una silla todo terreno que permite a cualquier persona con movilidad reducida o con discapacidad practicar el senderismo o participar en carreras con la ayuda de un piloto.

Está destinado a niños y personas a partir de 9 meses y con un peso inferior a 25 kilos. El niño debe ser capaz de sostener bien la cabeza y la espalda, y debe ser capaz de mantenerse sentado.

Gracias a sus 2 ruedas de una sola vía y su sistema de suspensión, la Joëlette Kid puede ir donde ninguna otra silla de ruedas puede ir: pistas, senderos, ¡fuera de los caminos!

Un manillar trasero permite al compañero pilotar fácilmente la Joëlette Kid.



Desde simples paseos a caminatas muy deportivas, carreras, senderos y maratones, la Joëlette Kid se adapta a las habilidades físicas de cada grupo de excursionistas o corredores. Un par de brazos opcionales en la parte delantera da acceso a las pistas muy difíciles, gracias a la ayuda de una guía frontal.

Este manual de usuario contiene información importante sobre el manejo y uso de Joëlette Kid. Para garantizar un uso seguro, por favor, lea este manual con atención.

Deben evitarse los daños o errores derivados de la inobservancia del presente manual. Un mantenimiento deficiente puede llevar a una pérdida de cobertura de la garantía. No intente llevar a cabo ningún trabajo o reparación en las manipulaciones que no están descritas.

El uso de la Joëlette Kid está bajo la total responsabilidad de la(s) persona(s) acompañante(s).

CONDUCIENDO A LA JOËLETTE KID

Manejar Joëlette Kid requiere una buena condición física para poder garantizar la seguridad del pasajero mientras se pone en marcha el vehículo. Sin embargo, no sólo está reservado a los «grandes deportistas» y también puede ser practicado en un espíritu de «caminar» por rutas más fáciles.

Conducir la Joëlette Kid es técnico y requiere una fase de aprendizaje. Para esto, le aconsejamos empezar con rutas fáciles y aumentar gradualmente el nivel.

TÉCNICA DE CONDUCIENDO GENERAL

LA TRIPULACIÓN

Sólo se necesita un acompañante para conducir la Joëlette Kid. Los pilotos complementarios pueden estar presente dependiendo de la dificultad de la ruta y la experiencia de los pilotos.




EL PILOTO

El piloto asegura el equilibrio de Joëlette Kid. Se asegura de que el pasajero esté sentado correctamente: el asiento está siempre horizontal y muy ligeramente hacia atrás. Esta posición garantiza un asiento cómodo para el pasajero y también certifica que la Joëlette Kid está bien posicionada en su punto de equilibrio.

Una vez encontrado el punto de equilibrio, el piloto utiliza el sistema de ajuste del manillar trasero para colocar el asiento al nivel más cómodo para él. El jinete es responsable de elegir la ruta. Observa el terreno que tiene

delante y elige el paso más adecuado para la Joëlette Kid, evitando en lo posible los obstáculos o rodeándolos. Cuando no puede evitarlos, tiene que apoyarse en el manubrio para levantar ligeramente la rueda delantera.

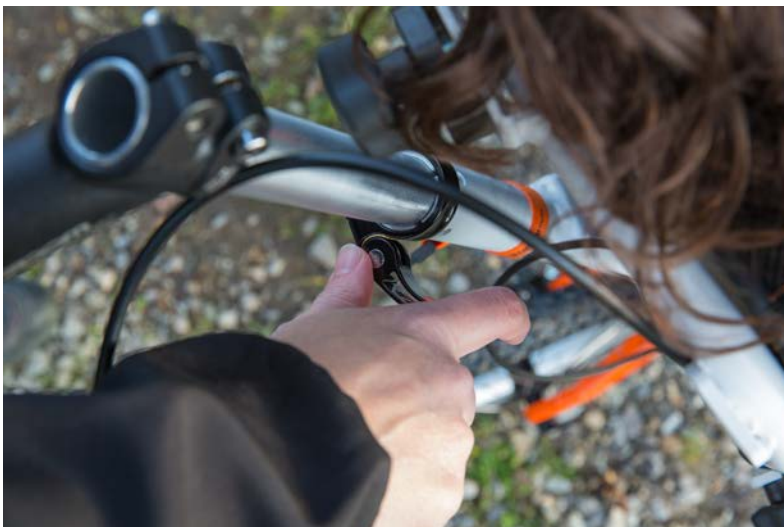

Ajuste del manillar trasero:

Cuando el soporte esté abierto, ajuste el manillar para un agarre natural y cómodo de la Joëlette Kid. Si el terreno cambia, el piloto tiene la posibilidad para ajustar el ajuste del manubrio.

Precaución : El ajuste del manubrio trasero se lleva a cabo siempre en un punto muerto. Caminar, causaría un riesgo de vuelco y/o una salida del tubo del manubrio en su alojamiento.

PASAJERO

Debe informar al piloto si siente algún desequilibrio en el manejo de Joëlette Kid. Si el niño siente desequilibrios, es una molestia para el niño que debe ser corregida, pero también significa que el piloto no está en la posición correcta.



El proceso de sentarse en una Joëlette Kid no es insignificante para un niño con discapacidad. Esto implica que renuncia a la autonomía que puede tener con su silla de ruedas manual o eléctrica y va a una silla de ruedas. Le da al piloto un control completo de su movilidad, así como de su seguridad!

El amortiguador y las ruedas específicas reducen las vibraciones y los golpes para asegurar el mejor confort al pasajero.

Salida... y Llegada

El uso del casco es obligatorio.



Cuando el pasajero está sentado, sigue mantener la JOËLETTE KID las manos y manteniendo el equilibrio, puede moverle a un lado para cerrar el soporte con el pie.

Por el contrario, al final de la excursión, sujétese firmemente el respaldo para moverse a un lado para abrir el soporte con el pie.

Incluso con el soporte abierto, debe tener vigilancia constante y proximidad con el pasajero, hasta que esté fuera del asiento. El soporte es un apoyo para la Joëlette Kid, ayuda a mantener pero no evita de ninguna manera el riesgo de báscula.



Mantenimiento

Antes de cada movimiento, cierra el arnés.

Ajuste la altura del reposapiés con el mango de sujeción del lado derecho.

Coloca el reposapiés de acuerdo con la morfología del niño. Puedes ajustar la inclinación y la altura.

Ajuste la inclinación del reposapiés con la rueda del pulgar.

Ajuste el reposacabezas (opcional) a la altura correcta (a la altura de las orejas del usuario) usando las dos ruedas. La posición correcta del reposacabezas evita la hiperextensión del cuello.



Ajustar la inclinación del respaldo usando las dos pequeñas ruedas laterales.

TÉCNICA ESPECÍFICA PARA MANEJAR LA JOËLETTE KID



DOWNTOWN

En un descenso, el piloto debe controlar el frenado y equilibrar a la Joëlette Kid, para evitar el riesgo de volcar.

- Frenado suave y sin tirones.
- La posición de las manos en el manubrio trasero posiciona en la pelvis.

EN LOS PASAJES TÉCNICOS

En el caso de cruzar obstáculos importantes (escalones, grandes piedras...):

- Se necesita una guía adicional y debe comunicarse con el piloto
- En caso de terreno irregular, la opción de los brazos delanteros es obligatoria.
- Tenga cuidado de no atrapar las puntas de los pies del pasajero
- Si es necesario transportar, utilizando los brazos delanteros, el conductor y el acompañante respectivamente se agarran al manillar trasero y a los brazos delanteros lo más cerca posible del pasajero para reducir el alcance con el fin de ejercer la menor tensión posible sobre los brazos delanteros.

En el caso de pasajes difíciles (pasajes estrechos, pendientes, inclinaciones pronunciadas, etc.).

- Es importante, para los que acompañan al pasajero, tener apoyos estables para asegurar realmente su seguridad y la del pasajero.

Si el pasajero teme sacudidas, no permita que el asiento se caiga repentinamente después de un cruce. o cuando se bajan los escalones, pero amortiguar el paso del obstáculo, frenando ligeramente la Joëlette Kid con brazos delanteros y manillares traseros.

EN LAS VUELTAS

El Joëlette Kid tiene ruedas fijas. En los giros, es necesario apoyarse en el manubrio trasero para para levantar ligeramente la rueda delantera. No obstante, manténgase alerta.

EN EL PERALTE

Cuando el Joëlette Kid se inclina (de lado), el asiento del Joëlette Kid debe mantenerse horizontal, de modo que el peso del pasajero descansa completamente sobre las ruedas. Se recomienda encarecidamente la opción del brazo delantero.

Aquí están los fundamentos de cómo manejar la Joëlette Kid. Es importante comenzar con rutas fáciles y aumentar gradualmente la dificultad. ¡Y sobre todo recuerde que la prioridad es sobre todo asegurar la comodidad y la seguridad del niño mientras se divierte!



INSTALACIÓN DEL PASAJERO EN LA JOËLETTE KID



El traslado

Asegúrate de estar en un terreno plano antes de abrir el stand. Instale al niño hasta alcanzar la mejor posición. La pechera debe estar abrochada. Siempre sostenga a Joëlette Kid con una mano hasta que llegue a su posición de piloto.

Manténgase alerta y sostenga firmemente a Joëlette Kid si desea cerrar/abrir el soporte.

Asegúrate de que la Joëlette Kid esté en una posición completamente estable.


En cualquier caso, recuerde tener cuidado al levantar al niño. Por favor, asegúrese también de que su técnica de traslado está adecuada para el niño con discapacidad. No dude en pedir consejo: ellos son los que mejor conocen su discapacidad y podrán decirle qué tipo de ayuda necesitan y qué no necesitan.

JOËLETTE KID CON INTERFAZ PARA EL CORSÉ ORTOPEDICO


La interfaz proporcionada se adapta a cualquier tipo de corsé de asiento, después de algunas modificaciones que puede hacer el ortopedista.

Siga las reglas de seguridad que se dan a continuación para asegurarse de que está en su lugar. Para la práctica del senderismo, su asiento-corsé debe estar equipado con refuerzos que lo sujeten firmemente a la base (véase la foto de al lado). Pregúntele a su ortopedista más información.


Su casco debe ser preinstalado antes del traslado. Las normas de traslado y mantenimiento mencionadas deben respetarse escrupulosamente.

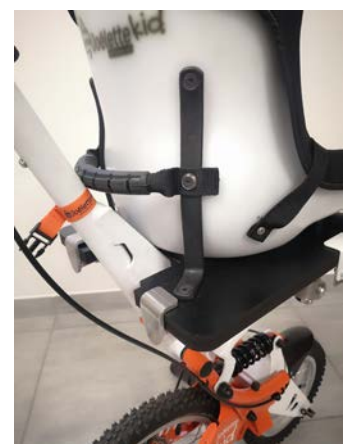

VISTA EN DESPIECE DE LA INTERFACCIA PER SEDILE SCOCCA

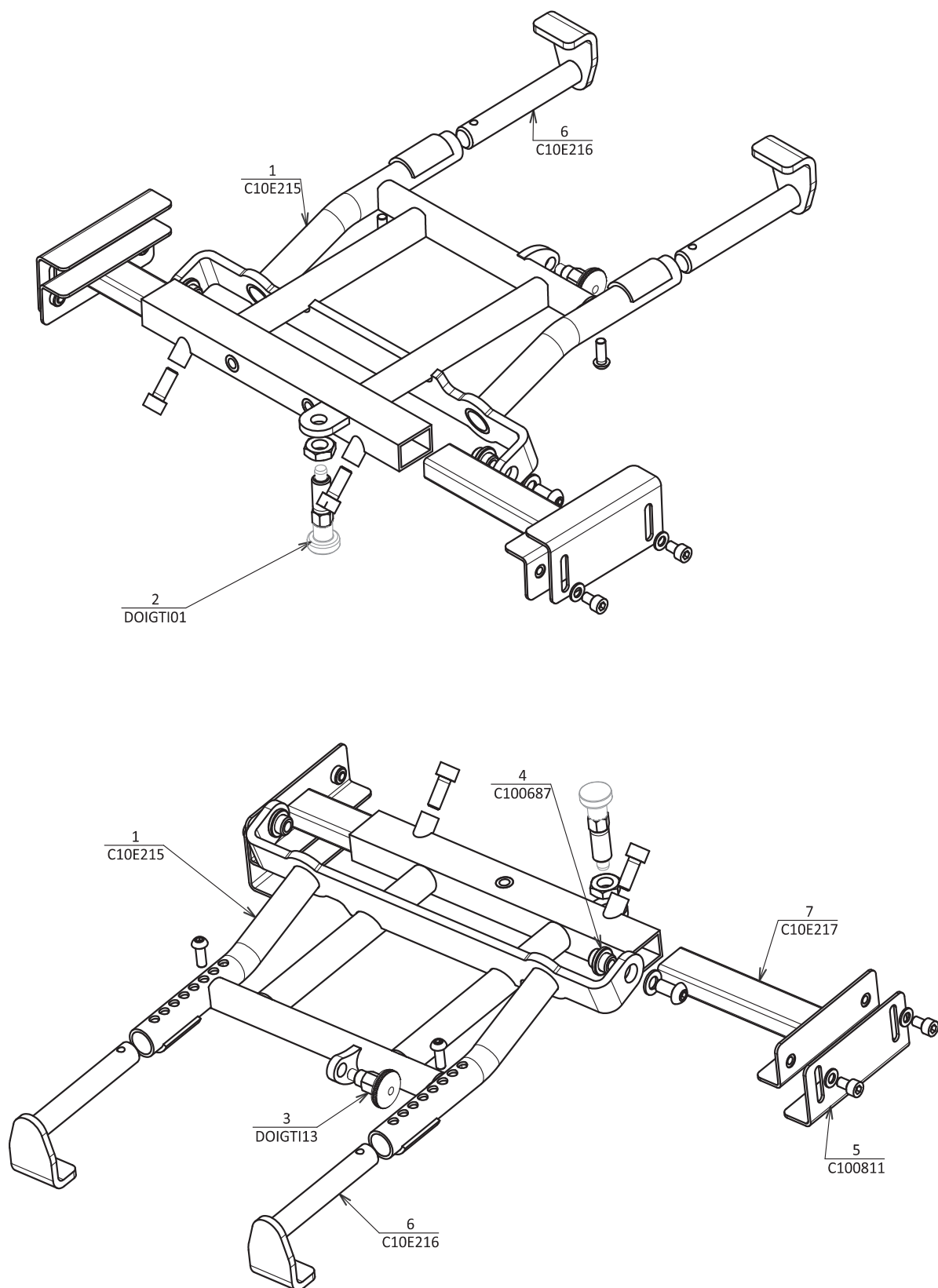



INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ PER SEDILE SCOCCA

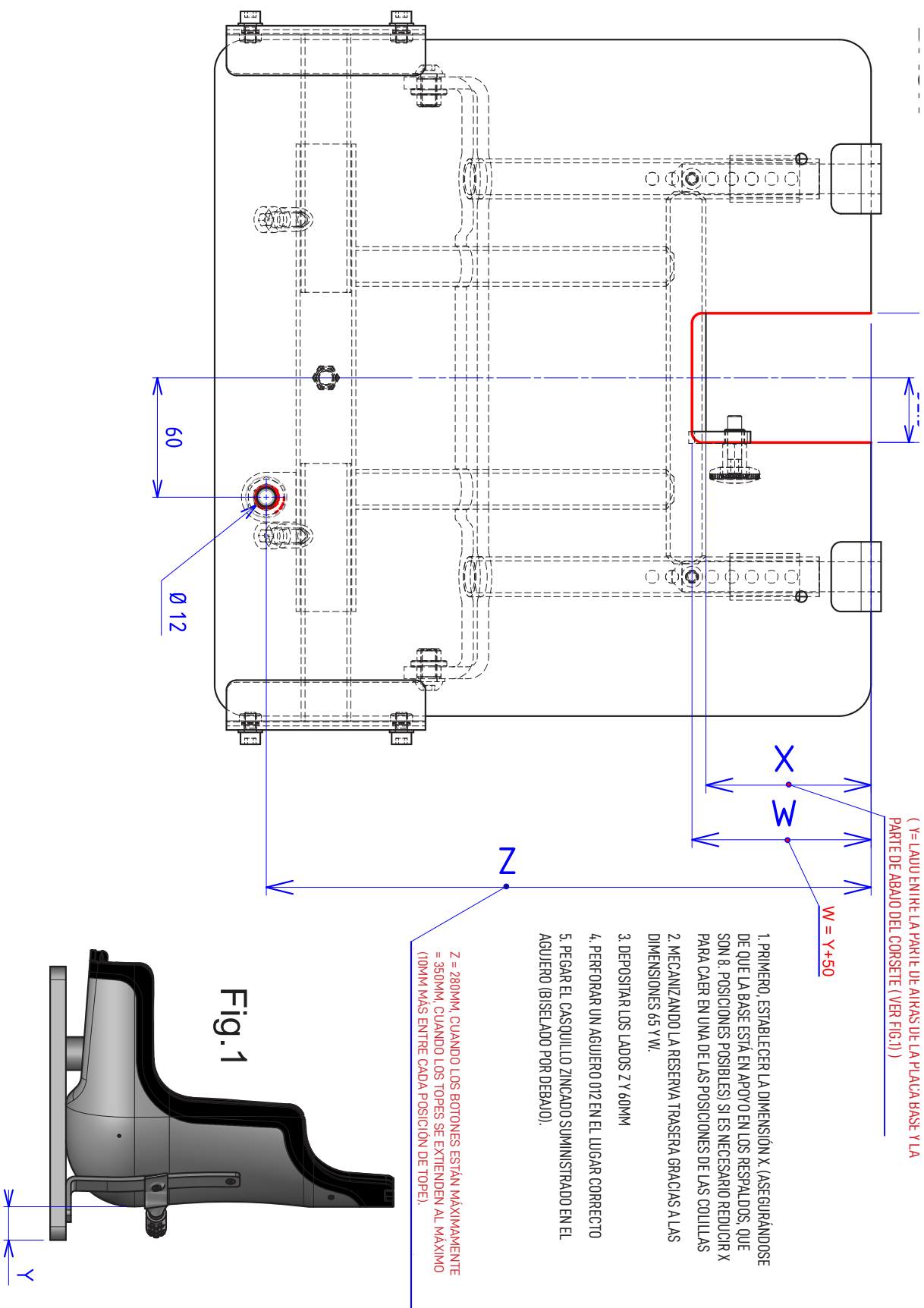

1. PRIMERO, ESTABLECER LA DIMENSION X, (ASEGURÁNDOSE DE QUE LA BASE ESTÁ EN APOYO EN LOS RESPALDOS, QUE SON 8 POSICIONES POSIBLES) SI ES NECESARIO REDUCIR X PARA CAER EN UNA DE LAS POSICIONES DE LAS COLLILLAS
2. MECANIZANDO LA RESERVA TRASERA GRACIAS A LAS DIMENSIONES 65 Y W.
3. DEPOSITAR LOS LADOS Z Y 60MM
4. PERFORAR UN AGUERO Ø12 EN EL LUGAR CORRECTO
5. PEGAR EL CASQUILLO ZINCADO SUMINISTRADO EN EL AGUERO (BISELADO POR DEBAJO).


Z = 280MM, CUANDO LOS BOTONES ESTÁN MÁXIMAMENTE = 350MM, CUANDO LOS TOPES SE EXTIENDEN AL MÁXIMO (100MM MÁS ENTRE CADA POSICIÓN DE TOPE).

DIMENSIONES LÍMITE PARA LA BASE DE LA CORSÉ PARA SER ADAPTADO

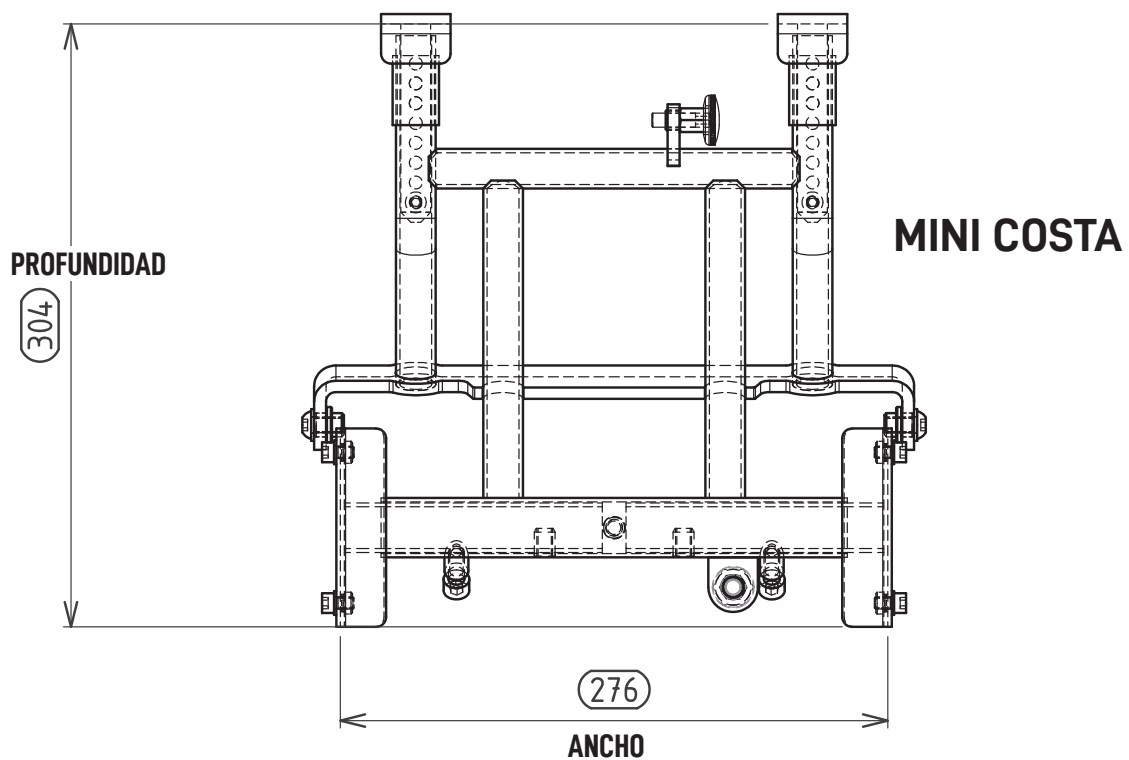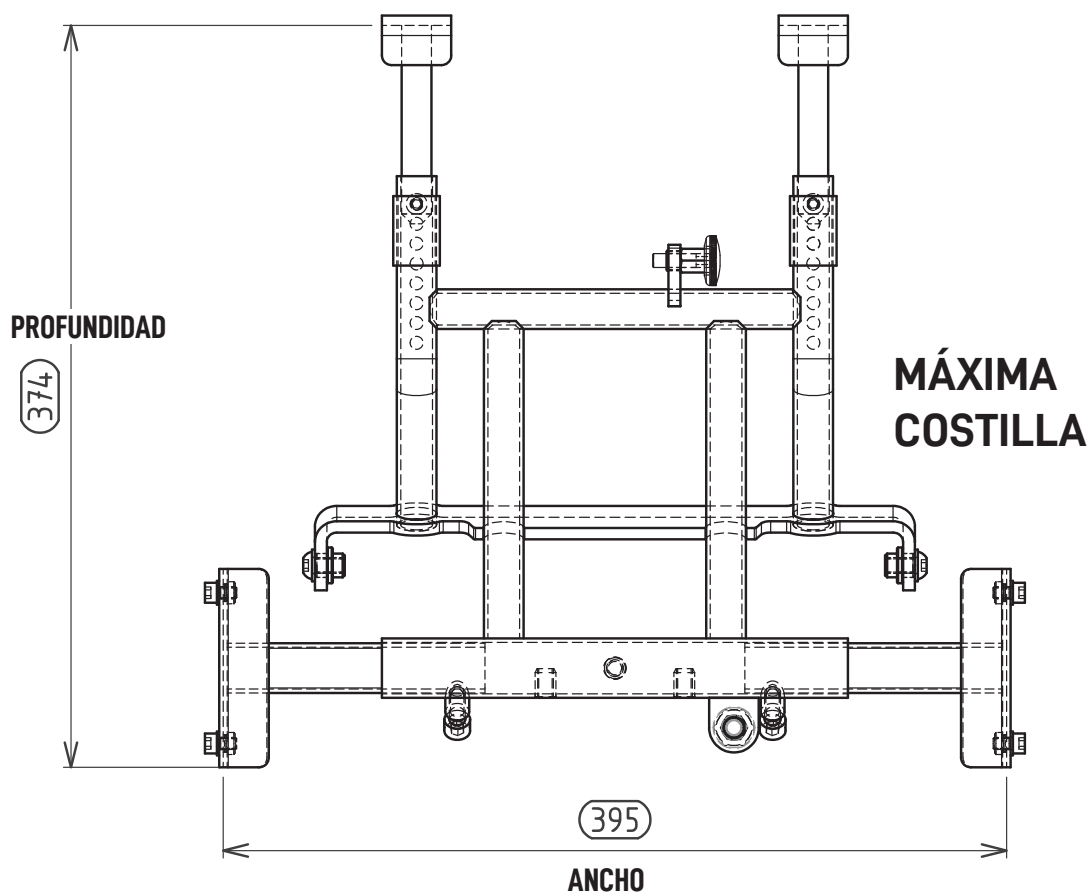

NORMAS DE SEGURIDAD

AL ADAPTAR LA BASE DEL CORSÉ, ES MUY IMPORTANTE REDUCIR AL MÍNIMO LA COSTILLA X, PARA POSICIONAR EL CENTRO DE GRAVEDAD AL MÁXIMO EN LA RUEDA TRASERA. POR LO TANTO, EL MECANIZADO DE LA PLACA BASE DEBE ADAPTARSE PARA LOGRAR ESTE RESULTADO.

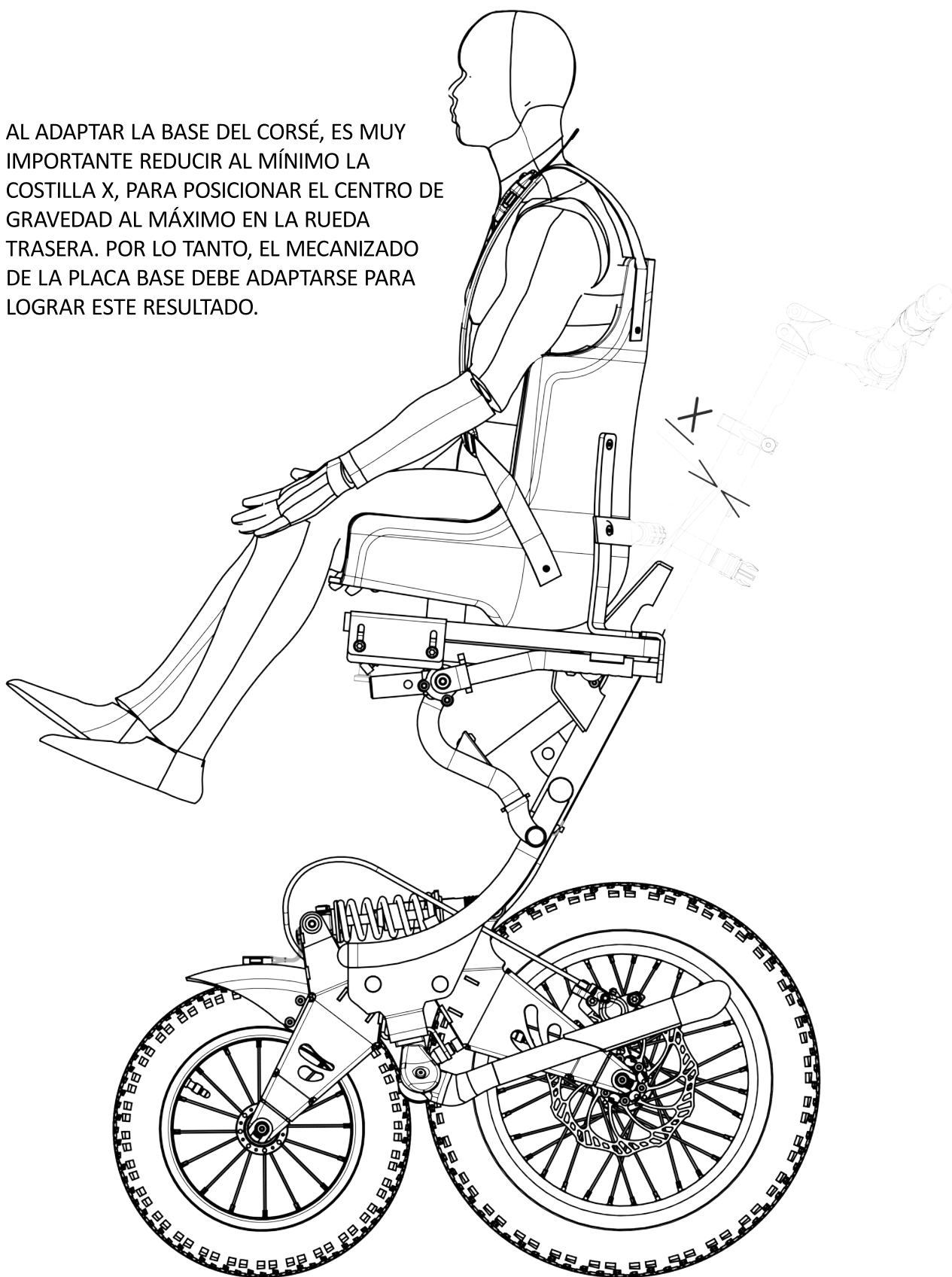

NORMAS DE SEGURIDAD AL USAR LA JOËLETTE KID

LOCALIZACIÓN DEL ITINERARIO

Antes de emprender una caminata con Joëlette Kid, tiene que averiguar qué ruta vas a tomar.

No piense, sin embargo, que sólo las pistas del bosque son accesibles, lejos de él. ¡Hay muchos caminos, en las llanuras o en las montañas que se puede practicar en Joëlette Kid!

Una buena manera de hacerse una idea de la dificultad de un itinerario es montarlo en una bicicleta de montaña: la Joëlette Kid va a todos los lugares donde va una bicicleta. De la misma manera, cada obstáculo, piedra, raíz, paso, surco, tronco de los árboles requiere un dominio técnico y un gasto físico adicional. No sobreestime sus habilidades: una caminata o sendero difícil siempre requiere un guía que está a cargo de los brazos delanteros.

LA COMODIDAD

Asegúrale de que el confort del niño sea lo mejor posible desde la partida, y que se obtiene :

- ajustando lo mejor posible el apoyapié y el reposacabezas,
- cuidando de que la ropa del pasajero esté bien puesta (al momento del traslado, puede que esté mal puesta),
- Atención al riesgo de lesiones si un elemento (miembro, ropa...) entra en contacto con piezas móviles.

LA TRIPULACIÓN

El número necesario de pilotos para manejar una Joëlette Kid puede variar de 1 a 2 personas según la dificultad del itinerario.

Tenga cuidado de no sobreestimar las capacidades físicas y técnicas de los pilotos.

PREPARA BIEN SU EXCURSIÓN

- Partir de un itinerario localizado previamente o referenciado accesible en Joëlette Kid.
- Elegir el itinerario en función de las capacidades físicas y técnicas del equipo de pilotos.
- Verificar que la Joëlette Kid se encuentre en buen estado. Verificación mecánica antes de la excursión.
- Informarse sobre el tiempo. En case de riesgo de tormenta, no salga (por su composición en metal, la Joëlette Kid atraerá los rayos). Debe saber igualmente que un itinerario transitable en Joëlette por buen tiempo puede convertirse extremadamente comprometido por un tiempo húmedo.
- Informar a sus allegados del itinerario que planea.
- Considere la opción de los brazos delanteros en caso de una caminata difícil o una carrera en la naturaleza.

SEGURO

Es obligatorio para cada acompañante disponer de un seguro de responsabilidad civil. El uso de la Joëlette Kid no requiere un seguro específico, pero esta práctica debe ser comunicada a su asegurador.


FONDO DE BOLSA

- Material habitual para excursiones en la montaña (mapa y brújula, estuche de primeros auxilios y manta isotérmica, linterna de bolsillo, agua y provisiones, ropa adecuada...)
- Teléfono móvil para prevenir al servicio de emergencia en caso de urgencia (número de urgencia europeo 112 o número de los equipos de rescate del sector).
- Material de reparación para la Joëlette Kid (herramientas adecuadas, kit de reparación en caso de pinchazo, cámara de aire de recambio o spray «antipinchazos», ...), pequeño material de reparación (correas, tensores ...).
- Para el pasajero, que puede estar rápidamente en una posición sensible respecto al frío, prever ropa abrigada. No olvide proteger las extremidades (guantes, gorro...) y si es necesario tenga previsto una funda de protección contra el frío (“funda isotérmica”). No olvide tampoco llevar una protección contra la lluvia tipo poncho que permite proteger igualmente en el caso del pasajero el igual que los accesorios de la Joëlette Kid (cojines, funda isotérmica...).


DURANTE LA EXCURSIÓN EN JOËLETTE KID

- Llevar un casco de bicicleta de montaña para el pasajero.
- Los pilotos de la Joëlette Kid deben estar calzados correctamente.
- Verificar la chaveta de los brazos sobre todo en los itinerarios con fuerte dificultad. Verificar el freno antes del descenso.
- Mantener constantemente el equilibrio y la posición correcta del asiento cualquiera que sea la cuesta o el estado del terreno.
- Ajustar la altura del manillar trasero de manera que no se encuentre por encima de la pelvis.
- No conducir la Joëlette Kid si se siente cansado. Saber decir y respetar sus propios límites.
- No ir muy rápido: hay que saber dónde pasa la rueda, dónde se pone los pies y no tropezar
- No olvidar comunicarse entre ustedes en particular al momento de pasos técnicos
- Tener cuidado con los bolsos voluminosos que pueden engancharse a los brazos (piloto delantero).
- Si hace frío, asegurarse de que el pasajero no corra el riesgo de hipotermia debido a su situación inmóvil, así como a su patología (trastornos circulatorios, pérdida de sensibilidad que no permite sentir el frío...).
- No dejar una Joëlette Kid sin soporte (caballete central) y sin nadie al lado, aún más si el pasajero presenta movimientos incontrolados.
- Y por último, recuerde que las caídas no ocurren en los pasos difíciles sino más bien en momentos tranquilos, por falta de vigilancia.

VISTA EN DESPIECE DEL CHASSIS DE LA JOËLETTE KID

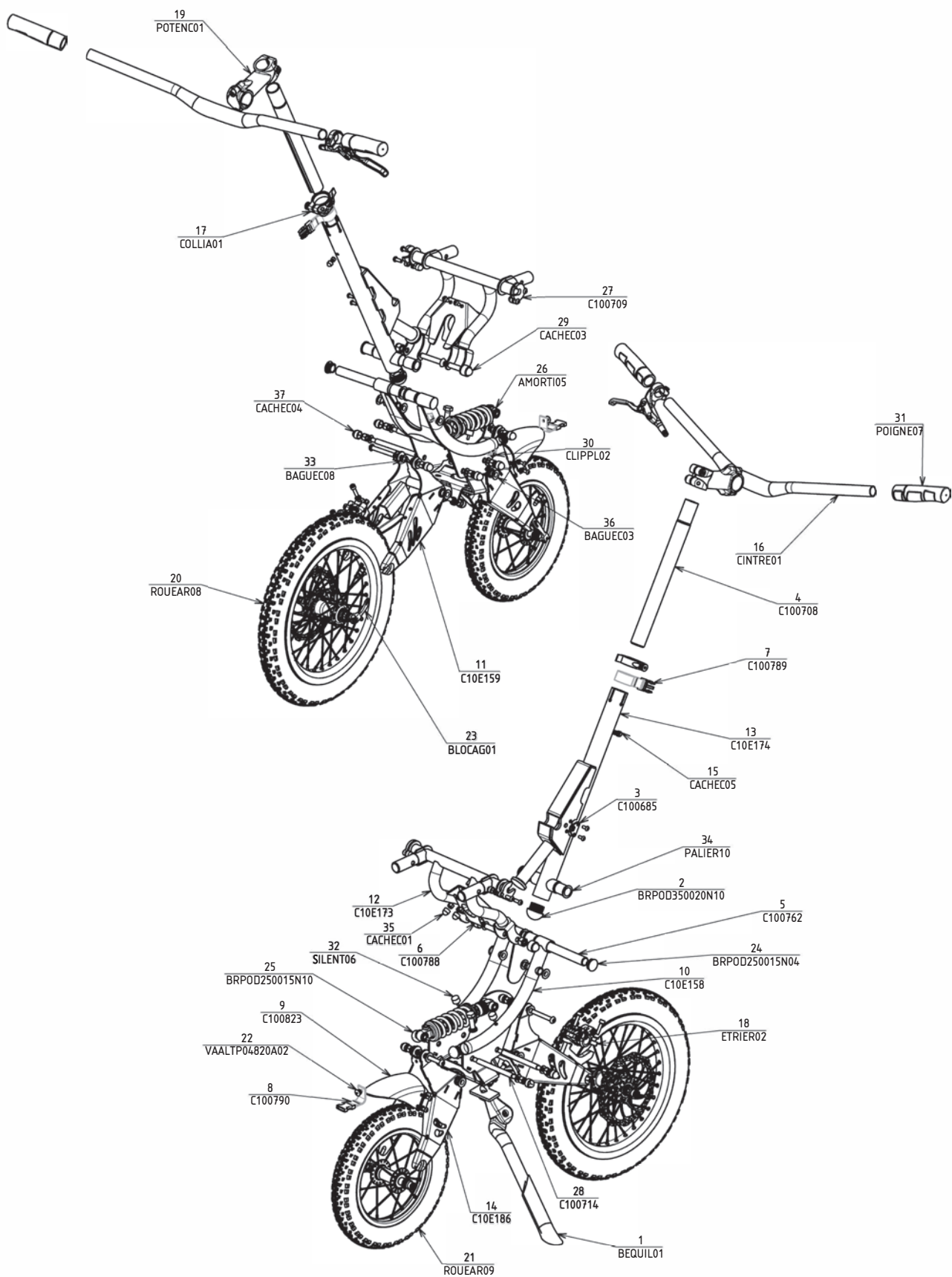

VISTA EN DESPIECE DEL ASIENTO DE LA JOËLETTE KID

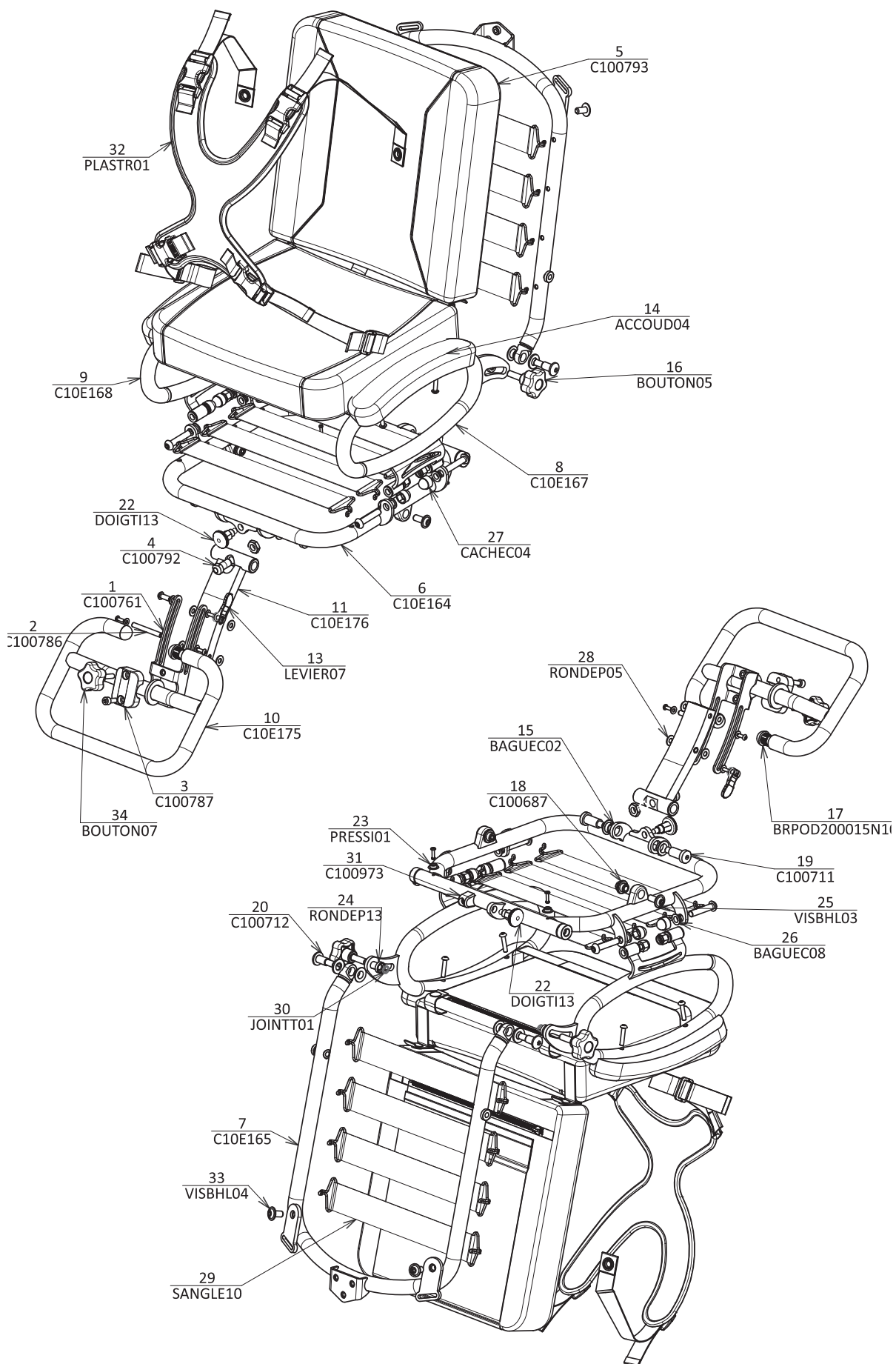

OPCIONES



REPOSACABEZAS

Ajustable según la talla de su hijo. Sistema de fijación incluido.



PAR DE BRAZOS DELANTEROS

Una fijación simple para adaptarse a su Joëlette Kid en caso de terreno difícil (gracias a la ayuda de un acompañante adicional)



SOMBRILLA

Se ajusta a la Joëlette Kid en el manillar trasero o en el respaldo. Es posible orientarlo.

Se guarda fácilmente en una bolsa durante la caminata.



BOLSAS DE ALMACENAMIENTO

Bolsas con espumas para proteger a Joëlette Kid de posibles daños. (es posible personalizarlos).

Tiene una correa para el hombro.

La primera bolsa está adaptada al chasis, la segunda al asiento y a los cojines (se venden por separado).



GUARDABARROS TRASERO

Se fija a la rueda trasera para evitar la suciedad.



SOPORTE PARA CANTIMPLORA

Soporte para cantimplora y cantimplora Joëlette And Co.

BOMBA DE PIE

Para volver a inflar los neumáticos en caso de desinflado o pinchazo.

PAR DE PEGATINAS PARA SOPORTES PUBLICITARIOS

Para personalizar su Joëlette Kid con adhesivos (logotipos, nombre, dibujo, financieros...).

KIT DE REPARACIÓN

Para intervenir en el Joëlette Kid en caso de un pinchazo.

MANTENIMIENTO DE LA JOËLETTE KID

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El término «mantenimiento» significa cualquier tarea llevada a cabo para garantizar que una Joëlette Kid se encuentre en buen estado de funcionamiento y está lista para su uso previsto. El mantenimiento abarca varias áreas, como el cuidado y la limpieza diarios, así como las inspecciones, las tareas de reparación generales.

Debe realizarse por lo menos una vez por años cualquiera que sea la frecuencia de uso. Un segundo mantenimiento es necesario en caso de uso regular (varias veces por semana).

El mantenimiento a prever es prácticamente el mismo que una bicicleta de montaña.

Consiste en verificar diferentes puntos :

- la presión de los neumáticos
- el buen funcionamiento del sistema de frenado, particularmente el buen estado del revestimiento de las pastillas de freno. Una empuñadura de freno un poco « suelta » no garantiza un frenado óptimo. Hay que evitar que la palanca llegue a tope sobre el manillar trasero antes de que el frenado sea máximo.
- la presencia de las clavijas de seguridad
- En caso de empuñadura « esponjosa » aunque el revestimiento esté nuevo o en buen estado, verificar y completar el nivel de aceite si es necesario en el cilindro principal de freno. Aceite para frenos disponible en todas las tiendas de bicicletas.
- Verificar que no haya fuga de aceite en la manguera a nivel de la empuñadura de freno o a nivel de la pinza de freno. En caso de fuga o pérdida de presión, contacte con un profesional especializado.
- En caso de una intervención a nivel del sistema de frenado hidráulico, particularmente al momento de cambiar las pastillas, estamos en condiciones de suministrarle un kit de vaciado del sistema. También encontrará en el paquete original, una cuña de plástico roja o naranja que se inserta entre las dos almohadillas en caso de que la rueda sea retirada.
- Se recomienda siempre tener un spray anti pinchazos en cada Joëlette Kid (kit de reparación opcional).

El mantenimiento puede realizarse por un reparador/arrendador de bicicletas o de motocicletos.

LIMPIEZA

En la limpieza de la Joëlette Kid, respete los puntos siguientes:

- Use solamente un paño húmedo y un detergente suave.
- No utilice para la limpieza productos abrasivos.
- No utilice un pulverizador a alta presión.
- Como las fundas de los cojines son termposellados, lípie sólo la superficie.

DESINFECCIÓN

Se permite desinfectar frotando o pulverizando con desinfectantes reconocidos y controlados. Encontrará una lista de los desinfectantes autorizados en la Web del Instituto Robert Koch <http://www.rki.de>.

LISTA DE INSPECCIÓN

La siguiente tabla enumera las comprobaciones que deben realizar el usuario y sus intervalos.

Antes de cada uso de la Joëlette :

PIEZAS	INSPECCIÓN	SI NO SE SUPERA LA INSPECCIÓN
Sistema de bloqueo del asiento (perno de anclaje)	Asegurese de que el movimiento del perno de anclaje este libre sin atascarse y de que el asiento este bien bloqueado	Pongase en contacto con nosotros
Neumático	Compruebe que el neumático no este dañado.	Pongase en contacto con nosotros o con un revendedor de ciclos.
	Compruebe que el neumático este inflado a la presión correcta.	Infle el neumático a la presión correcta. Consulte el capítulo datos técnicos. Para la reparación de la cámara de aire, pongase en contacto con nosotros o con un revendedor de ciclos.
Presencia de los pasadores y clavijas de seguridad	Compruebe la presencia de los alfileres dispositivo de seguridad del brazo delantero si tienes la opción	Pongase en contacto con nosotros
Dispositivo de soporte ventral y correas para el pasajero.	Asegurese de que la hebilla de cierre cumple perfectamente su función. Compruebe que las costuras o mosquetones de amarre no estén dañados.	Pongase en contacto con nosotros

Regularmente

ELEMENTO	INSPECCIÓN	SI NO SE SUPERA LA INSPECCIÓN
Todas las piezas acolchadas	Compruebe si hay partes dañadas o desgastadas, notablemente la presión de sujeción del cojín del asiento, así como la correa de velcro que sujeta el respaldo.	Pongase en contacto con nosotros
Frenado	Asegurese de que el nivel de desgaste de las pastillas de freno no sea excesivo.	Pongase en contacto con nosotros o con un revendedor de ciclos.
	Compruebe que el nivel del líquido de frenos en el cilindro maestro es suficiente.	Pongase en contacto con un revendedor de ciclos.

ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN

En caso de que no vaya a usar la Joelette Kid durante un largo periodo de tiempo, recomendamos almacenarla en una temperatura de 15 °C, evitar el frío o el calor extremo en el lugar de almacenamiento para garantizar una larga vida útil.

Almacene la Joelette en un entorno seco y bien ventilado, protegido de las influencias externas. Sobreinfla ligeramente las ruedas neumáticas.

DESPUÉS DEL USO

ELIMINACIÓN

- El embalaje de la silla se desecha en el reciclaje para cartón.
- Las piezas metálicas se desechan en el reciclaje de chatarra.
- Las piezas de plástico se desechan en el reciclaje de plásticos.
- La eliminación debe realizarse según las normas nacionales legales respectivas.

DATOS TÉCNICOS

La información técnica proporcionada en el presente documento se aplica a una configuración estándar de la Joëlette Kid o representa los valores alcanzables máximos.

Estas características pueden cambiar si se añaden accesorios.

Nb: Tenga en cuenta que, en algunos casos, los valores medidos pueden variar en +/- 10mm.

CONDICIONES Y LUGARES DE USO Y ALMACENAMIENTO AUTORIZADOS	
Intervalo de temperatura de funcionamiento	de -25°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento recomendada	15°C

NEUMÁTICO TRASERO	
Tipo de neumático	16'' x 1.9''
Presión	La máxima presión de inflado recomendada para el neumático en bar o kPa se indica en el la pared interna del neumático. Si se indica más de un valor, más bajo en la unidad correspondiente se aplica.

NEUMÁTICO DELANTERO	
Tipo de neumático	12'' x 1.9''
Presión	La máxima presión de inflado recomendada para el neumático en bar o kPa se indica en el la pared interna del neumático. Si se indica más de un valor, más bajo en la unidad correspondiente se aplica.

Dimensiones

	KID (SIN REPOSACABEZAS, CON EL MANUBRIO HACIA ABAJO)
Altura total	1031mm
Anchura total	620mm
Longitud total	860mm
Altura de asiento (en funcionamiento)	715mm
Altura de asiento	330mm
Anchura de asiento	270mm
Profundidad de asiento	50mm
Espesor de asiento minima	350mm
Altura de respaldo	50mm
Espesor respaldo mini	90° à 110°
Angulo respaldo	6°
Angulo asiento	130mm
Altura apoyabrazos	225mm
Longitud apoyabrazos	de 180mm à 300mm
Distancia reposapiés/asiento	400mm
Dimensiones plegada del chasis	737(L) x 528(A) x 290(a)
Dimensiones plegada del asiento	490(L) x 372(A) x 110(a)
Dimensiones plegada de la interfaz	318(L) x 315(A) x 125(a)

PESO			
	Chasis Kid	Asiento (sin reposa- cabezas, con cojines)	Interfaz
Peso	8.2 kg	4 kg	1.8 kg

KID + ASIENTO	
Carga máxima	25 Kg

DESPLIEGUE DE LA JOËLETTE (CON ASIENTO)



1. Despliega el soporte. Coloca el chasis sobre sus ruedas. Afloja la correa de la parte delantera, luego endereza el tallo hasta que oigas el «clic». Comprueba que el chasis está bloqueado.



2. Desbloquea la abrazadera del manillar e inserta el manillar en la potencia, luego bloquea la abrazadera.

3. Toma el asiento y dobla el reposapiés hacia adelante.

APRIETE LA ABRAZADERA CON LA SUFICIENTE FIRMEZA PARA EVITAR QUE EL MANUBRIO SE DESLICE AL TRANSPORTAR LA BICICLETA.



4. Coloca el asiento en las horquillas del marco previstas para este fin.




5. Incline el asiento en la hendidura trasera con su dedo índice tirada.



6. Incline los apoyabrazos a los lados del asiento y levante el respaldo.



7. Levante los apoyabrazos y atorníllelos al respaldo con las perillas, ajustando su inclinación.

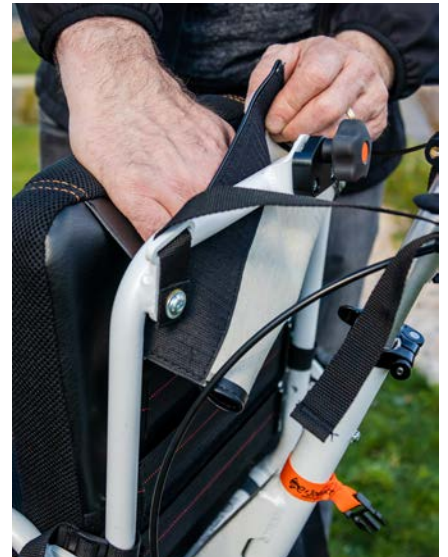

8. Ponga los cojines en el asiento. Ata las correas del respaldo del asiento al armazón. Fijar el cojín del respaldo pasando el forro de tela detrás del respaldo y mantenerlo en su lugar con el cierre de velcro.



9. 9. Ajustar la posición del manubrio para una mejor comodidad de uso.

¡Tu Joëlette Kid está lista para ser usada!

Para doblar a Joëlette Kid, proceda en la dirección opuesta.


Para desbloquear el marco, proceda como se muestra en la imagen opuesta.



Un video está disponible en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.



INSTALACIÓN DEL REPOSACABEZAS EN EL ASIENTO (EN OPCIÓN)

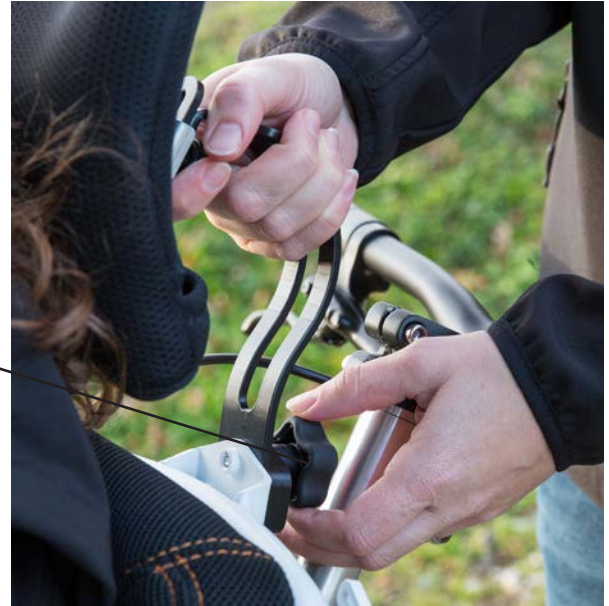

1. Inserte el soporte del reposacabezas entre el respaldo y la parte plástica y asegúrelo con la perilla



2. Ajuste la altura del reposacabezas con la pequeña perilla en la parte posterior del mismo.



3. Ajuste la inclinación del reposacabezas girándolo al ángulo deseado.



INSTALACIÓN DEL BRAZOS



1. Inserte el brazo en el tubo previsto para ello debajo del asiento



2. Alinee los agujeros de ambos tubos para acomodar el pasador de seguridad.



3. Inserte el imperdible y doble la parte metálica redondeada del tubo para asegurar el accesorio. Compruebe que los brazos están bien sujetos.

AJUSTE DE LA COMPUERTA



Puedes ajustar la dureza del amortiguador de tu Joëlette Kid gracias a la tuerca situada en la parte trasera del muelle, pero también su velocidad de rebote con el pomo situado en la parte delantera.

ALMACENAMIENTO DEL NIÑO JOËLETTE EN SUS BOLSAS (OPCIONAL)



1. Primero coloca el chasis y luego coloca el manubrio en las ruedas (tubo hacia arriba).

2. Dans le second sac, placer l'assise pliée et les coussins.

Atención: cuando pliegues y guardes tu Joëlette Kid, ten cuidado de no pellizcar los tubos de los frenos hidráulicos. La sección transversal de las mangueras no está cubierta por la garantía.

CONTACTO

**NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON EL EQUIPO
JOËLETTE AND CO PARA CUALQUIER PREGUNTA**



export@joëletteandco.com

SAV : jc-odin@joëletteandco.com



0033 (0)4 - 77 - 42 - 62 – 58

Rejoignez la Joëlette's Community sur les réseaux sociaux !



@FERRIOL-MATRAT – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este manual está protegido por la ley del 11 de marzo de 1957 sobre la propiedad literaria y artística, completada por la ley del 3 de julio de 1985 y por todos los acuerdos sobre derechos de autor. De acuerdo con estas leyes y convenciones, no se autoriza ninguna reproducción, copia total o parcial del manual, programas o sistemas sin el previo consentimiento por escrito de FERRIOL-MATRAT. FERRIOL-MATRAT se reserva el derecho de revisar y mejorar estos productos. Esta publicación describe la situación del producto en el momento de su publicación y no prejuzga los cambios que pueda sufrir.